

**Equipo para administración de sangre Sistema Clearlink.**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

103" (2,6 m)

Filtro estándar de sangre de 170 a 260 micrones

Válvula Luer activada

Adaptador Luer Lock macho.

Superficies internas estériles y no pirogénicas.

Catalogo número	Descripción	Gotas/ml	Longitud
2C8751	<b>Equipo para administración sangre</b>  Con filtro estándar de sangre grande (170 a 260 micrones) y 1 válvula Luer activada Clearlink de 6" y adaptador Luer lock macho. El paso del fluido es estéril y no pirogénico.	10	103" (2,6m)



S\* indica que el equipo tiene un sistema de tubos compatible con las Bombas Volumétricas de Infusión COLLEAGUE y FLO-GARD series 6201 y 6301

[REDACTED]

reemplace inmediatamente la válvula. En caso de desconexión intermitente del equipo con la válvula Luer activada, cubra inmediatamente el Luer macho del dispositivo de conexión con un protector estéril Reemplazar el equipo según las directrices de la AABB/CDC.

Las longitudes son aproximadas.

Para información de producto, llame al 1-800-933-0303

*Baxter*

Baxter Healthcare Corporation  
Deerfield, IL 60015 Estados Unidos  
Hecho en Costa Rica


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo para uso con envases rígidos no ventilados, con las bombas COLLEAGUE y FLO-GARD series 6201 y 6301.

Superficies internas estériles y no pirogénicas.

*(Omnio)*

Catalogo número	Descripción	Gotas/ml	Longitud
2C8857	<p><b>Equipo ventilado de administración de Paclitaxel</b></p> <p>(Segmento para bomba de 12" sin DEHP con línea revestida de polietileno, filtro de alta presión descendente de 0,22 micrones, 1 válvula Luer activada de 6" CLEARLINK y adaptador Luer Lock macho.)</p> <p>El paso del fluido es esteril y no pirogénico.</p>	10	108" (2,7m)

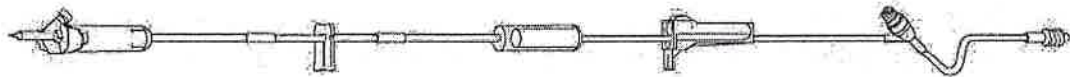

La trayectoria del fluido está libre de DEHP

**Clearlink Sistema de Acceso Intra-venoso**

administración al programarse con velocidades de flujo superiores a 250 mL/h. o si el tiempo de infusión es mayor de 8 horas.

Venta sólo con receta médica. Para un solo uso. No re-esterilizar.

**Notas:** Este producto contiene látex natural. Las superficies internas no contienen DEHP; la capa exterior de polietileno que reviste las líneas contiene DEHP. Enjuague la válvula Luer activada (8) tras la inyección para evitar la mezcla involuntaria de medicamentos/fluidos incompatibles. Enjuague la válvula Luer activada tras la infusión de sangre. En caso de que no se pueda limpiar la sangre, reemplace inmediatamente la válvula. En caso de desconexión intermitente del equipo con la válvula Luer activada, cubra inmediatamente el Luer macho del dispositivo de conexión con un protector estéril. No recomendado para infusión por gravedad. Añada el medicamento en el envase antes de conectarlo Coloque el filtro (5) al nivel o por debajo del corazón. Cuando no se utilice el equipo, cierre la abrazadera/pinza (7) por debajo del filtro (5). No se deben hacer pasar por el filtro (5) soluciones transportadoras con sangre, emulsiones o medicamentos que no sean completamente solubles. Cuando se administren inyecciones en bolo por debajo del filtro (5), cierre la línea entre el filtro (5) y el puerto de inyección. Reemplace el equipo cada 24 horas Las longitudes son aproximadas. Para información de producto, llame al 1-800-933-0303


Baxter, CLEARLINK, FLO-GARD y COLLEAGUE son marcas de Baxter International Inc.

**Equipo para administración de soluciones CONTINU-FLO con espigo/conector DUO-VENT**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Para uso con envases flexibles y rígidos no ventilados.  
Superficies internas estériles y no pirogénicas.

Catalogo número	Descripción	Gotas/ml	Longitud
2C8541	Equipo para Administración de Soluciones con espigo Duo-Vent. <b>SISTEMA CLEARLINK</b> 3 válvulas activadas Clearlink Luer para adaptador Luer Lock macho y collar retráctil	10	105" (2,7m)



El diagrama muestra un dispositivo médico lineal con un extremo de conexión a la izquierda y un extremo de conexión a la derecha. A lo largo del tubo principal, hay tres válvulas activadas Clearlink Luer, cada una con un adaptador Luer Lock macho y un collar retráctil. El tubo tiene una longitud total de 105 pulgadas (2,7 metros).

**Notas:**

Este producto no contiene látex natural. Este producto contiene DEHP. Para detener el flujo sin tocar el dispositivo regulador (8), cierre la llave/pinza reguladora (7). Enjuague la válvula Luer activada (6) tras la inyección para evitar la mezcla involuntaria de medicamentos/fluidos incompatibles. Enjuague la válvula Luer activada tras la infusión de sangre. En caso de que no se pueda limpiar la sangre, reemplace inmediatamente la válvula. Para la administración de un medicamento secundario, emplee únicamente la válvula superior activada por Luer (5). Consulte las instrucciones para uso con un equipo secundario de administración de medicamentos. En caso de desconexión intermitente del equipo con la válvula Luer activada, cubra inmediatamente el Luer macho del dispositivo de conexión con un protector estéril. Reemplazar según las directrices del CDC.

Las longitudes son aproximadas.

Para información de producto, llame al 1-800-933-0303

Baxter, CLEARLINK, CONTINU-FLO y DUO-VENT son marcas de Baxter International Inc.

Patentes de Estados Unidos nº 4,662,599; 5,290,239; 5,300,044 y 6,039,302

Fabricado por una filial de  
Baxter Healthcare Corporation  
Deerfield, IL 60015 Estados Unidos  
Hecho en Costa Rica